

SAMARIT – MOBICARE

Therapeutische Bett-Gleitauflage

SAMARIT Mobicare wird zur Dekubitusprophylaxe eingesetzt um langzeitbettlägrige Patienten alle zwei Stunden ohne Kraftaufwand umzulagern, d.h. von Rückenlage in Seitenlage zu drehen. Dabei wird der Patient auf dem Mobicare an den Bettrand gezogen und dann in Seitenlage gegen die Bettmitte gedreht. Ein Keilkissen im Rücken und eine leichte Anwinkelung eines Beines (wenn möglich) erhöhen die Sicherheit.

Der Innenkern der Mobicare-Bett-Gleitauflage besteht aus Polyester-Fasern mit sehr hoher Elastizität. Sie ist schlauchförmig gefertigt und innen mit einem glatten Nylon-Gewebe versehen. Die äussere Umhüllung besteht zur Hälfte aus einem sanforisierten, hautfreundlichen Baumwoll-Stoff einerseits und einem wasserundurchlässigen, jedoch atmungsaktiven Spezialgewebe andererseits.

ANWENDUNG

Die Anwendung von Mobicare ist einfach, zeitsparend und bequem für die Mitarbeiter der Krankenpflege und für die Patienten.

- Mobicare wird normalerweise mit dem weissen Baumwoll-Gewebe nach oben auf das Bett gelegt
- Um das Mobicare unter den Patienten zu legen, wird die gleiche Technik wie beim Umbetten (neues Leintuch) angewandt.
- Mobicare wird für inkontinente Patienten mit dem wasserdichten Spezialgewebe (gelb) nach oben auf das Bett gelegt.
- Vor dem Einnehmen der Sitzposition im Bett wird ein Fixierband durch die obere Schlaufe gezogen und am Bettrahmen befestigt.

VORTEILE

- Einfache Verlagerung des Patienten im Bett ohne Kraftanwendung
- Erleichterung der täglichen Arbeit der Krankenpflege
- Komfortable Lagerung des Langzeitpatienten
- Selbstmobilisierung bei Lähmungspatienten wird ermöglicht
- Verhinderung von Decubitus
- Waschbar in einer Waschmaschine (5 kg)

REINIGUNG

Desinfektion und Waschen der Bettgleitauflage bis 80° C.