

SAMARIT GLIDEBELT (S/M/L)

Art No. 450.2100 small 72-90 cm / 28-35 pulg. UDI/GTIN 7640144461041	Art No. 450.2200 medium 88-106 cm / 35-42 pulg. UDI/GTIN 7640144461058	Art No. 450.2300 large 104-122 cm / 41-48 pulg. UDI/GTIN 7640144461065
--	--	--



Los Glidebelts SAMARIT se fabrican en Europa (UE) fabricados con textiles sólidos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cinturón de movilización de pacientes con medidas de perímetro de cintura de 72–122 cm (S / M / L)
- Tejido interior transpirable y acolchado para maximizar el confort del paciente.
- El magnífico forrado interior antideslizante se fija a la ropa del usuario y proporciona un soporte adicional que garantiza la fiabilidad del transfer.
- Cinchas de agarre cómodas y adecuadas para manos de todos los tamaños.
- Posición de manejo ajustable.
- Posible elección de asideros de correas verticales y laterales para facilitar la sujeción del cliente cuando sea necesario
- Gran sujeción de la región lumbar del usuario.

USADO POR

- Aquellos cuidadores que necesitan asistir a pacientes en la transferencia en posición sentada/de pie (incrementa seguridad)

SECTORES DE APLICACIÓN

*Asistencia domiciliaria * Terapia Ocupacional *Celadores
*Servicios sociales *Enfermería general *Unidades renales

INSTRUCCIONES DE USO

Estos productos se utilizan para la seguridad de los pacientes durante una transferencia sentado o de pie, sobre un Glideboard o Turnplate. La transferencia asistida debe ser efectuada por un cuidador formado o instruido.

1. Coloque el 'Glidebelt' alrededor de la cadera del paciente y fíjelo con el velcro.
2. Asegure el 'Glidebelt' con el bucle del cinturón y apriete.
3. Para sujetar al paciente mientras lo traslada (o gira) introduzca las manos en las asas adecuadas. (3-5 en la parte trasera del Glidebelt)
Esto permite guiar de forma segura y evitar daños en la piel del paciente.
4. El cuidador debe seguir técnicas de manipulación manual correctas y actualizadas.



Atención: En caso de emergencia deslice lentamente al paciente de lado a una cama, silla o el suelo.

MATERIAL

Tejido especial de polietileno con doble capa: resistente al desgarro

DIMENSIONES

TALLA: **Small:** 72 - 90 cm

Medium: 89 - 106 cm

Large: 104 - 122 cm

LIMPIEZA

Se puede lavar a 75°C y debe colocarse en una bolsa textil cuando se hace a máquina (para evitar daños).

o

mejor se puede limpiar con “Incidin® OxyWipe” de ECOLAB o cualquier desinfectante hospitalario comparable (sin cloro, sin concentrado, sin lejía)

GARANTÍA

2 años

FABRICANTE**SAMARIT MEDICAL AG**

Gewerbestrasse 12, 8132 Egg b. Zürich, Switzerland

Webite: www.samarit.com

Contact: info@samarit.com